



Erläuterungen zur Einlagenübersicht

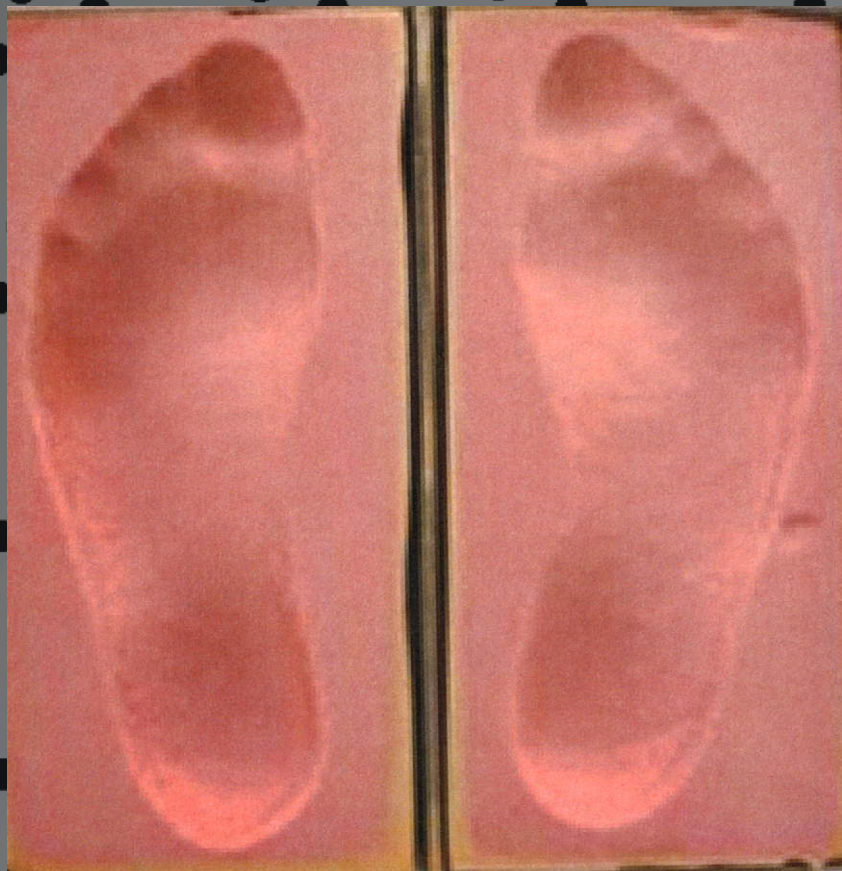

September 2017



Gesund werden. Gesund bleiben.

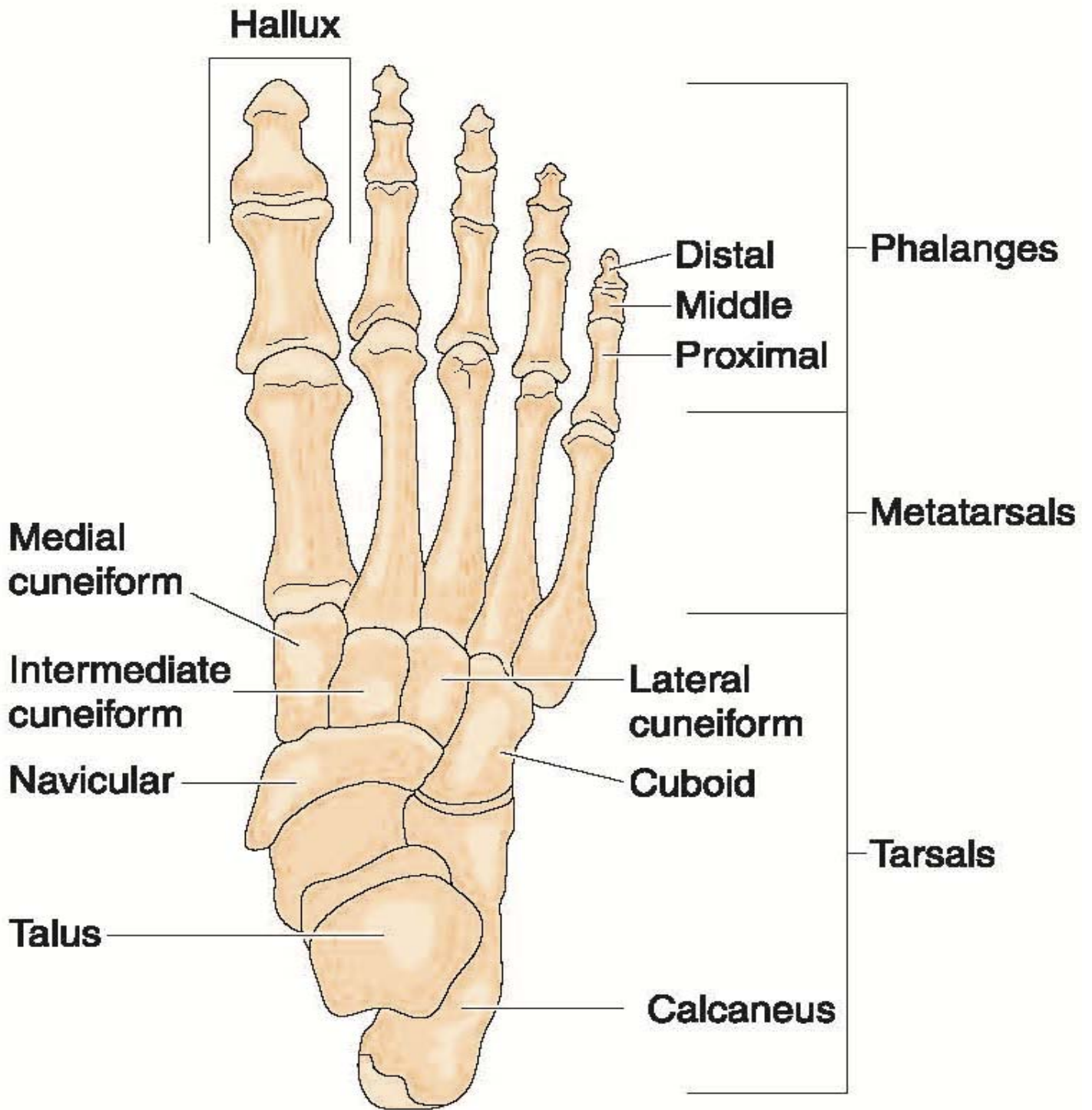

Sanitätshaus Lambert Salzburg

Ich möchte die Kompetenz von Medizinprodukte Beratern (früher Verkäufer-/innen) stärken und möchte die Fachkenntnisse in laufenden Zeitabständen schulen und so zum Wohle unserer Kunden ein kompetenteres Fachwissen aufbauen.

Es wäre auch für Techniker eine willkommene Auffrischung, da auch hier Schwächen erkennbar sind. Auch möchte ich, dass unser Personal die Kunden besser berät und so der Kunde von unserem Fachwissen einen direkten Vorteil hat.

Die wichtigste Aufgabe: lesen Sie die ärztliche Verordnung genau! Sollten Sie eine Diagnose nicht lesen können oder verstehen, fragen Sie bitte einen unserer Techniker und lassen Sie sich dies genau erklären.

Einlagen sollten Fehlstellungen des Fußes vermeiden bzw. korrigieren, den Bewegungsapparat entlasten bzw. unterstützen, die Muskulatur und Sehnen des Körpers entlasten und aktivieren, eine gleichmäßige Druckverteilung auf den Fußsohlen erreichen und so zur Vermeidung oder zur Verbesserung von Fußkrankungen beitragen.

Außerdem vermeiden Sie Überlastungsbeschwerden beim Gehen oder Stehen im Bereich der Fußsohlen, der Füße, der Ober-/ Unterschenkel sowie der Hüfte und im Bereich der Wirbelsäule.

Allgemeiner Hinweis: Es wäre gut dem Kunden zur Erhaltung der Fußgesundheit zu raten, die Füße zu pflegen, nicht austrocknen zu lassen und regelmäßig mit einer Feuchtigkeitscreme einzucremen. Weiters der Hinweis mehr Abwechslung für Ihre Füße - auch barfuß gehen und Fußgymnastik zu betreiben um die Beweglichkeit der Füße und Zehen zu erhalten.

Älteren Patienten oder Diabetikern sollte ein regelmäßiger Gang zur medizinischen Fußpflege empfohlen werden. Auch sollten immer gut passende Schuhe verwendet werden.

Die beim Sanitätshaus Lambert erhaltenen Einlagen sollten in der Herstellung - ganz gleich bei welchem Standort - der Kunde diese bezieht, auch überall gleich aussehen - siehe unser Einlagen-Prospekt mit den dort angegebenen Materialien.

Zu den Maßeinlagen

Wir fertigen die Einlagen nach einer Trittspur oder einem Schaumabdruck an. Bei beiden Arten macht der Kunde den Einlagenabdruck im belasteten Zustand. Man belastet mit dem gesamten Körpergewicht, daher spricht man von einem Abdruck im belastetem Zustand.

Der Techniker erkennt hier am Abdruck genau die Stellen, die einen zu hohen Fußdruck haben.

Auch der Einsatz von modernen Techniken, wie Scanner oder 3D Fußabdrucke, finden Anwendung.



Trittspurapparat

Aus der Trittspur liest der Techniker den Zustand des Fußes heraus und weiß wie er seine Einlagen zu bauen hat. Trittsuren gibt es aber auch bei Schaumabrücken, die nebenbei noch den Vorteil haben, dass diese mit Gips ausgegossen werden kann und korrigierbar sind - die Notwendigkeit entscheidet der Techniker. Für den Einlagenbau von Maßeinlagen sind Trittsuren oder Schaumabdrücke gleichwertig.





Normalfuß

Senkfuß

leichter Plattfuß

schwerer Plattfuß

Eine gut sitzende Einlage wird im sogenannten Mittel zwischen unbelastetem und belastendem Zustand gefertigt. So entsteht die Korrektur die manchmal stärker oder schwächer ausfällt, je nach Bedarf. Aber aufpassen: vorsichtig damit umgehen, zuviel Korrektur ist schmerzhaft!

Wir bieten unseren Kunden als Maßeinlagen folgende Modelle an:

- EL 111 Aktive Einlagen mit stoßdämpfender Sohle bei gutem Längsgewölbe u. Metapolster
- EL 112 Soft Einlagen mit Kork Sohle bei gutem Längsgewölbe u. Metapolster
- EL 113 Soft Einlagen mit marmorierter blauer Sohle, Korkaufbau. Bei gutem Längsgewölbe und Meta
- EL 114 Soft Einlagen mit gelochter Sohle, viscoelastisch. Bei gutem Längsgewölbe und Meta
- EL 115 Detto mit abwaschbarer Oberfläche - Erdbeerdesign langsohlig
- EL 116 Detto mit abwaschbarer Oberfläche - Journaldesign langsohlig
- EL 117 Plextar Classic langsohlig
- EL 118 Detto mit abwaschbarer Oberfläche - Erdbeerdesign kurzsohlig
- EL 119 Detto mit abwaschbarer Oberfläche - Journaldesign kurzsohlig
- EL 120 Plextar Classic kurzsohlig

Es hat macht keinen Unterschied auf die Paßform, ob die Sohle langsohlig oder kurzsohlig ist.

Die Einlagen EL 115 bis EL 120 haben ein rutschfestes Untermaterial, sodass die Einlagen im Schuh nicht rutschen können.

Wenn ein Patient eine Einlage in einem Berg-, Wander- oder Schischuh verwenden will empfehlen wir neben unseren Spezial-Sporteinlagen auch als Kompromiss die Aktiveinlage EL 111.

Hinweis : Spezial- bzw. Sporteinlagen sind keine Leistung der Krankenkasse.



Sonderwünsche bei Einlagen - zur Privatverrechnung

Hat der Patient besondere Wünsche wie z. Bsp., einen anderen Oberflächenbezug oder zusätzlich einen Lederbezug mit oder ohne Lochung so ist dieser Wunsch von dem Kunden zu bezahlen. Zum Beispiel:

EL 2000	Mehrpreis Quermeta auf Einlage	per Stk
EL 2001	Mehrpreis Fersenhohllegung auf Einlage	per Stk
EL 2002	Mehrpreis Ballenfreilegung auf Einlage	per Stk
EL 2004	Mehrpreis Supinationskeile auf Einlage	per Stk
EL 2008	Mehrpreis Pronationskeile auf Einlage	per Stk
EL 2009	Mehrpreis Höhenausgleich auf Einlage	per Stk
EL 2010	zusätzlicher Diabetikerbezug	per Stk
EL 2024	zusätzlicher Oberflächenbezug	per Stk
EL 2025	zusätzliche Lederoberfläche, micro gelocht	per Stk
EL 2026	zusätzliche Lederoberfläche, unperforiert	per Stk
EL 2027	isolierte Silikonfreilagerungen	per Stk

Spreizfuß

Ist eine sehr häufige Fußfehlstellung. Durch eine Schwäche der entsprechenden Fußmuskeln sinkt das Fußquergewölbe ab und man spricht vom Spreizfuß. Begünstigt wird der Spreizfuß auch durch erbliche Veranlagung und durch Tragen von zu hohen Schuhen (Stöckelschuhen).

Öfters treten der Spreizfuß mit einem Plattfuß oder einem Senkfuß bzw. Knickfüße gemeinsam auf. Auch Zehendeformierungen und Erkrankungen der Metatarsalgien treten oft gemeinsam auf.

Der Spreizfuß wird durch einen Metapolster weitgehend entlastet. Die Größe vom Spreizfußpolster hängt vom Techniker bzw. den anatomischen Verhältnissen - Schwielen, Hornhaut - etc. ab. Plantare (=sohlenwärtige) Warzen verursachen wieder/auch Druckstellen auf der Fußsohle. Auch Entzündungen der einzelnen Metatarsalköpfchen können sehr schmerzhaft sein und zu einer Metatarsalgie führen.

Auch Nervenentzündung wie zum Bsp. bei Neuropatien können echte Gehhindernisse werden.

Bei entzündeten Spreizfüßen können Weichbettungen hilfreich sein - siehe Bettungseinlage.

Erschwert wird ein Spreizfuß auch durch einen Hallux valgus.

Der Großzehenballen scheuert am Schuh wird gereizt und schmerzt. Dadurch entsteht eine Auswachsung des Großzehengrundgelenks - dies nennt man auch Exostose sprich Hallux valgus.

Senkfuß, Plattfuß

Beim Absinken des Längsgewölbes spricht man von einem Senkfuß. In diesem Fall braucht der Patient Einlagen mit einem gut angepassten Längsgewölbe, damit es zu keinen statischen Beschwerden kommt, die sich als Schmerzen im Bereich der Füße, Ober- und Unterschenkel, Hüfte und Rücken bemerkbar machen. Wir empfehlen dazu Einlagen wie EL 114, EL115, EL 116, EL117, EL 117 bis EL 121, EL135.

Bei einem kompletten Absinken des Längsgewölbes spricht man von einem Plattfuß.

Ist der Plattfuß nicht mehr korrigierbar spricht man von einem fixierten Plattfuß.



Hohlfußeinlagen

Hier empfehlen wir Maßeinlagen die im Längsgewölbe eine nicht anliegende Paßform haben und eher unterstützend sind auf die Sehnen und die Fuß-Muskeln. Im Bereich des Längsgewölbes wirken sie eher streckend. Zudem haben sie eine gute Metatarsalstütze um die Überlastung im Ballenbereich zu entlasten.

Wir empfehlen Einlagen EL 117 oder EL 121.



Modelleinlagen

Bei Indikationen wie z. Bsp. Sichelfuß, Fehlstellungen im Vorfußbereich, kontrakter Knick-Senk-Platt-Hohlfuß, Hohlfuß, Klumpfuß, Zustand n. Fersenbeinbruch, rheumatisch bedingte Fußformen, neurogener Platt-Knick-Klump-Spitzfuß, Morbus Köhler I und II sind Modelleinlagen notwendig.

Hier wird ein Schaumabdruck ausgegossen und korrigiert und nach diesem Abdruck ein Gipsmodell angefertigt.



Bettungseinlagen

Fixierter Plattfuß, chron. Polyarthrit (PCP Fuß), Charcotfuß, trophische Störung, Gicht, Neuropathie, Malum perforans, Angiopathie, rheumatisch bedingte Fußform.

In all diesen Fällen empfehlen wir nach Modell die Anfertigung von Bettungseinlagen

Modell EL110 (Einbau), Modell EL 122

Hallux Valgus

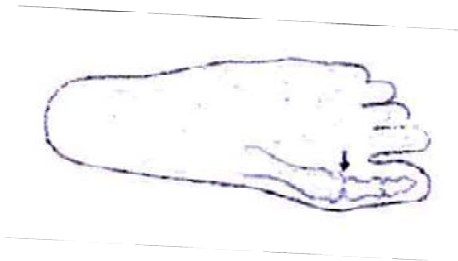


Bild Quelle: Ortho Unfall

Verschiedene Hilfen können wir bei Hallux valgus anbieten:

- 1.) Salbenbereich: wir reduzieren in diesem Bereich alle Cremes und Salben auf den seit 40 Jahren bewährten, schmerzlindernden und entzündungsabklingenden Dalletbalsam 30gr., der in Kürze wieder über unser Hauptlager erhältlich sein wird.
- 2.) Zur Vorbeugung und Schutz vor Verschlimmerung: OFA Hallux Valgustrumpf oder Strumpfhosen
- 3.) Druckschutzartikel:

Silikon	Zehenkeile ELZ 015
Silikon	Zehenspreizer ELZ 005
Silikon	Ballenschalen ELZ 009

Frage an unsere Techniker: Herr Schaumburger fertigt in Salzburg die Hallux Korrektur Orthese mit großem Erfolg an. Warum wird diese nur in Salzburg gemacht?

- 4.) Hallux Korrektur Orthese Synth. Kunststoff indiv Anfert. TNR. 34050 001
- 5.) postop. Erstversorgung Pauschale TNR. 34050 002
- 6.) Nachtschiene dzt. Ofa dynamics Halluxschienen TNR 34050 013
- 7.) Hallux Schiene mit Gelenk
- 8.) Halluxschuhe mit dehnbaren Einsätzen im Ballenbereich

Wird der Hallux operiert

Zur postoperativen Mobilisierung sollte der OFA Vorfußentlastungsschuh verwendet werden.

TNR 34161 024

Zum Druckschutz im Schuh - postoperativ - Ballenschale ELZ 009 verwenden.

Zur Fixierung des Operationsergebnisses sollte eine

postop. Erstversorgung Pauschale

TNR. 34050 002

Nachtschiene dzt. Ofa dynamics Halluxschienen

TNR 34050 013

verwendet werden.

Unser Rat an Patienten: ab jetzt passende Schuhe tragen.

Hallux Rigidus

Der Großzehenzwischenraum wird kleiner und dadurch das Abrollen schwieriger und schmerzhaft. Bei den Schuhzurichtungen kann der OSM Schuhmacher helfen mit einer Abrollwiege, einer Sohlenversteifung.

Bei den Einlagen sollte eine Abrollhilfe in der Form gewählt werden, dass wir auf jeden Fall das Einlagenunterteilmodul mit Zehenfeder wählen: EL 130, das Obermaterial kann frei gewählt werden. Entweder ein 2-3 mm Schaummaterial gelocht oder ein dünner gelochter Bezugsstoff, Metapolster nach Bedarf.

Verrechnung:	1 x Bandagisten TNR 14 121 000	68,80+Mwst
	2 x TNR 14 110 000 á 16,32	32,64+Mwst
	Summe	101,44+Mwst

siehe Unterteil EL 130
Oberfläche nach freier Gestaltung

EL130 Rigiduseinlagen mit Zehenfeder



Indikation:

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom I, Arthrose im Großzehengrundgelenk, Hohlfuß, Metatarsalgie, zur Ruhigstellung des Großzehengrundgelenks

Fersensporneinlagen

In manchen leichten Fällen wird ein Silikonfersenkissen mit einer zentralen Weichlagerung getragen.

TNR 14111 002, Einlagen FO 130

Bei der Fersensporneinlage wird ein Einlagenunterteil verwendet, EL 132 zur indiv. Anfertigung.

Die Oberfläche und Metapolster werden vom Techniker zusammengestellt.

Privatverrechnung:	Einlagen EL 132	TNR 14121 000	68,80+Mwst
	Fersenhohllegungen	2 x TNR14111 000	45,86+Mwst
	Summe		114,68+Mwst
Krankenkassenverrechnung:	Einlagen EL 132	TNR 14121 000	68,80+Mwst

Ein eingearbeitetes Fersenspornentlastungskissen ist bei den Krankenkassen nicht verrechenbar.

EL132 Fersensporneinlage / Bausatz



Indikation:

Fersensporn, Beinhautreizung im Fersenbereich, Überlastungsbeschwerden im Fersenbereich

Sporteinlagen, EL 121

Z. Bsp. Modell 18. Golfeinlagen: diese Einlagen sind Randzonen verstärkt und haben dadurch eine extrem gute Standfestigkeit.

Privatverrechnung: Einlagen EL 121 122.-+Mwst



Indikation:

Knick-Senk-Spreizfuß, Knickfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Metatarsalgie

Produkt:

Der Bausatz ist vorne offen, um den Metapolster individuell einsetzen zu können. Die Einlage hat verschieden harte Oberflächen und ist randsohlenverstärkt. Dadurch hat sie eine extrem gute Standfestigkeit.

Hier angebotene **Spezial-Sporteinlagen** sind **keine Krankenkassenleistung** und müssen den Kunden **privat in Rechnung** gestellt werden.

EL 155	Spezial Sporteinlagen mit Stahlgerippe	188,00 + Mwst
EL 156	Spezial Sporteinlagen mit Stahlgerippe	188,00 + Mwst
EL 136	Spezial Sporteinlagen mit Magn. Kraftfeld	156,67 + Mwst

Diabetikerdeckung: zusätzlich zu Einlagen, EL 2010

Hält ein halbe Jahr und ist dann zusammen gedrückt und gehört erneuert.

Diabetikerdeckung per Paar zusätzlich auf Einlagen oder bei Reparaturen

TNR 14120 000 32,88 + Mwst

High Heel Einlagen für Stöckelschuhe, EL 131

Spezialeinlagen für Stöckelschuhe mit hoher Sprengung und größtmöglichem Tragekomfort.

Vermindern eine Bein- und Rückenermüdung und lindern den Vorfußdruck und verbessern die Fußstabilität.

Einlagen EL 131 TNR 14121 000 68,80+Mwst

EL131

High Heel-Einlagen



Indikation:

Senk-Spreizfuß, Fersenfrie für Damen Stöckelschuhe

Wirkungsweise:

Vermindert Bein- und Rückenermüdung, sowie Vorfußdruck und verbessert die Fersen-Stabilität.

Produkt:

Die Mittelfußknochen-Polsterung und die Pelotte sorgen für größtmöglichen Tragekomfort. Der Unterbau besteht aus rutschfestem Material und hilft dem Fuß, sich in seiner Position zu halten. Empfehlung: Einbau der Einlagen in den Schuh für optimalen Halt.

Bettungseinlagen: EL 110 für den fixen Schuheinbau

Bettungseinlage langsohlig, kann jedoch nur über die Orthopädieschuhmacher verrechnet werden. Der Seitenrand der Einlagen ist erhöht, dadurch bettend. Der Bausatz wird vom Schuhmacher zum Fixeinbau in den Schuh zugerichtet.

EL110

Bettungseinlagen für den fixen Schuheinbau



Indikation:

Diabetiker, Entzündungen im Fußbereich, Diabetischer Fuß

Produkt:

Der Bausatz ist unten nicht ausgeschliffen, die Einlage ist in den Schuh einzubauen. Der Seitenrand ist im Fersen- und Längsgewölbebereich erhöht und dadurch bettend.

Diabetikereinlagen: Bettungseinlage langsohlig EL 122

Spezialeinlagen für entzündete, trophische oder diabetische Füße und bei Neuropathien.

Diabetiker spüren nicht wenn sie auf der Fußsohle offen sind, daher gehört die Fußsohle besonders geschützt.

Modelleinlagen mit weicher, druckableitender Weichbettung. Diese Diabetikerdeckung ist besonderen Ansprüchen ausgesetzt und ist halbjährlich verbraucht. Sie sollte daher alle halbe Jahre erneuert werden.

Anfertigung erfolgt nach Modell, Schaumabdruck ausgegossen

TNR 14 151 000

134,72+Mwst

EL122

Diabetikereinlagen, langsohlig



Indikation:

Entzündeter, trophischer und diabetischer Fuß

Produkt:

Weiche Softeinlagen – Weichbettung

Hinweis: Die Diabetikerpolsterung ist besonderen Ansprüchen ausgesetzt und hat eine reduzierte Haltbarkeit. Die Einlagen sollten halbjährlich erneuert werden.

Es nützt eine gutsitzende Einlage wenig wenn die Zehen deformiert sind.

Hilfen bei Einlagenersatz :

Silikon Pronations/Supinationsleisten

ELZ 001

Größen: medium, large, x-large

Aus Silikon zur Korrektur bzw. Verlagerung der Außen- oder Innenüberlastung in dem Schuh.

Silikon Metaleisten

ELZ 002

Größen: 1,2

Aus Silikon zur paarweisen Spreizfußentlastung in Schuhen in denen für Einlagen kein Platz ist.

Silikon Längsgewölbeeinbau

ELZ 003

Größen: 1,2,3

Aus Silikon zur paarweisen Längsgewölbeentlastung in Schuhen in denen für Einlagen kein Platz ist.

Es stellt dies eine praktische Alternative für zu enge Schuhe (z.Bsp. Theaterschuhe oder Tanzschuhe) dar.

Silikon Fersenkeil

ELZ 018

Größen: small, medium, large

Aus Silikon zum paarweisen Einlegen in den Schuh.

Silikon Fersenkissen per Paar

MSFO 130

Größen: small, medium, large

Dämpfungfersenkissen aus Silikon zum paarweisen einlegen in den Schuh, mit zentraler blauer Weichlagerung.

Silikon Dämpfungseinlagen ELZ 004

Größen: small, medium, large, x-large, xx-large

Aus Silikon zum paarweisen Einlegen in den Schuh, zur Dämpfung und als Ausgleich auch für den Sport bestens geeignet. Material aus hyperallergischem Silikon und rutschsicherer Oberfläche.



Indikation:

Schmerzen im Fußsohlenbereich. Diese Dämpfungseinlage gehört in jeden **Sportschuh**, da der Fuß durch die Sehnen und Bänder von Natur aus auf Federung eingestellt ist.

Wirkungsweise:

Weichpolsterung (blau) im Bereich von Ballen und Ferse

Produkt:

Zum Einlegen in den Schuh. Nicht rutschende Oberfläche fußseitig. Material aus hyperallergischem Silikon

Hilfen bei Zehendeformierungen

Es sind gute Hilfen für die Patienten und es ist wichtig, dass den Patienten zur Schmerzverhütung oder Schmerzerleichterung die richtigen Silikonbehelfe empfohlen werden.

Zur Richtungskorrektur von Zehen

ELZ 005 Silikon Zehenspreizer Gr. 1, 2, 3

ELZ 015 Silikon Zehenkeile Gr. small, large

Zum Hallus Valgus Schutz

ELZ 009 Silikon Ballenschutz universal

Zur Korrektur von Krallen-Zehen, Hammerzehen, Druckstellen

ELZ 006 Silikon Zehenrichter mit Zehenschlaufe Gr. universal

ELZ 007 Silikon Zehenring Gr. 1,2,3,

ELZ 008 Silikon Ballenschild m Ring Gr. 1,2,3,

ELZ 016 Silikon Zehenkappen Gr. 1,2,

ELZ 018 Silikon Ballenschild m zehen-Seperator Gr. universal

Da wir von unserem Silikon - das die beste Druckableitung hat - sehr überzeugt sind, werden wir in Hinkunft nur mehr diese Artikel in diesem Sektor führen bzw. verkaufen.

2010 hat der Hauptverband diktatorisch die Einlagenpreise um ca. 35% gekürzt. Da die Löhne nicht billiger geworden sind, sondern eher jedes Jahr steigen hat die Firma Medisan Bausätze entwickelt um überhaupt noch den Versuch zu machen einigermaßen kostendeckend zu bleiben oder nicht allzu viel Verlust zu machen.

Aufzahlungen auf Einlagen sind nicht gestattet, also müssen wir mit dem wenigen was die Kasse zahlt auskommen.

Diese Medisan Bausätze sind vorne offen, ein Metapolster wird eingearbeitet und dann die jeweiligen Schichten dem Fuß Maßabdruck angepasst und verklebt.

Wir müssen bemüht sein, dass wir eine hohe Qualität zu diesen unglaublich kümmerlichen Preis liefern können. Wir dürfen diese Preiserpressung nicht am Rücken der Patienten austragen, aber wir müssen erreichen auch wirtschaftlich zu überleben.

Diabetikersochen - kein Tarifprodukt

7RD0000	Lambert Diabetikersocken	schwarz	Gr.37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.
7RD0000	Lambert Diabetikersocken	anthrazit	Gr.37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.
7RD0000	Lambert Diabetikersocken	weiß	Gr.37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.
7RD0000	Lambert Diabetikersocken	beige	Gr.37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.

Anti Embolie-Str. A-D bis zum Knie

MSAEAD-	Anti Embolie-Str. A-D bis zum Knie	Gr. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL	1 Paar
	Anti Embolie-Str. A-D bis zum Knie	TNR: 44 370 011	50 Paar
	Anti Embolie-Str. A-D bis zum Knie		100Paar

Anti Embolie-Str. A-G bis über das Knie

MSAEAG-	Anti Embolie-Str. A-G ,Oberschenkel	Gr. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL	1 Paar
	Anti Embolie-Str. A-G ,Oberschenkel	TNR: 47 370 016	50 Paar
	Anti Embolie-Str. A-G ,Oberschenkel		100Paar

größensortiert, A-G mit Hafband

Strümpfe - kein Tarifprodukt

Waden Reisetstrumpf	Gr. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL
Waden Herrenvenenstrümpfe	Gr. XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Wenn es Rückfragen gibt, bitte an mich oder an Herrn Franz Kornpeintner. Danke.

Kontakt:

Sanitätshaus Lambert Salzburg:

5020 Salzburg, Alpenstraße 39, Tel. 06 62 / 63 04 44

5020 Salzburg, Bergstraße 8, Tel. 06 62 / 87 96 88

5020 Salzburg, Ignaz-Harrer-Str. 44 b, Tel. 06 62 / 42 51 15

5020 Salzburg, Ignaz-Rieder-Kai 21, Tel. 06 62 / 62 20 02

Lambert Einlagen-Schuh GmbH (vormals Auer Orthopädie)

5020 Salzburg, Itzlinger Hauptstr. 18, Tel. 0662 / 45 00 07

Sanitätshaus Lambert Salzburg:

5071 Wals, Krimpling 2, Tel. 06 62 / 85 06 03

5400 Hallein, Bahnhofstraße 4, Tel. 0 62 45 / 70 399

5400 Hallein, Kornsteinplatz 3, Tel. 0 62 45 / 800 81

5441 Abtenau, Markt 253 d, Tel. 0 62 43 / 44 0 74

5580 Tamsweg, Schloßparkweg 2, Tel. 0 64 74 / 84 19

5600 St. Johann, Industriestr. 26, Tel. 0 64 12 / 76 91

5760 Saalfelden, Almerstraße 10, Tel. 0 65 82 / 737 15

Sanitätshaus Lambert Oberösterreich:

4020 Linz, Blumauer Straße 41, Tel. 07 32 / 65 23 66

4780 Schärding, Alfred-Kubin-Str. 3, Tel. 0 77 12 / 44 18

4910 Ried, Hartwagnerstraße 11, Tel. 0 77 52 / 878 48

5280 Braunau, Talstraße 2, Tel. 0 77 22 / 877 84

5280 Braunau, Stadtplatz 51, Tel. 0 77 22 / 68 111

5310 Mondsee, Herzog-Odilo-Str. 52, Tel. 0 62 32 / 33 45

Sanitätshaus Lambert Tirol:

6330 Kufstein, Oberer Stadtplatz 15, Tel. 0 53 72 / 642 52

Stand: April 2017. Vorbehaltlich Druck- und Satzfehlern. Abgebildete Fotos sind Symbolfotos.

MASS- UND MODELLEINLAGEN

EL111

Aktiveinlagen für sportive Schuhbekleidung



Indikation:

Entzündeter Senk-Spreizfuß Überlastungsbeschwerden

Produkt:

Mit stoßdämpfender Sohle, gutem Längsgewölbe und Metapolster

EL112

Softleinlagen – Kork, blau, langsohlig



Indikation:

Senk-, Spreiz-, Knickfuß, Köhler Syndrom I und II, Metatarsalgie

Produkt:

Elastische Korkeinlage mit viscoelastischer Oberflächendeckung. Sehr gute Abstützung des Längsgewölbes und Metatarsalgewölbes durch elastische Pelotten

EL113

Softleinlagen - Marmor, langsohlig



Indikation:

Senk-, Spreiz-, Knickfuß, Köhler Syndrom I und II, Metatarsalgie

Produkt:

Elastische Korkeinlage mit viscoelastischer Oberflächendeckung. Sehr gute Abstützung des Längsgewölbes und des Metatarsalgewölbes durch elastische Pelotten

EL114

Softleinlagen – viscoelastisch, langsohlig



Indikation:

Senk-, Spreiz-, Knickfuß, Köhler Syndrom I und II, Metatarsalgie

Produkt:

Basiseinlage ist EL111 oder EL112.

Elastische Einlage mit viscoelastischer Oberflächendeckung. Gute Abstützung des Längsgewölbes und des Metatarsalgewölbes durch elastische Pelotten
Oberfläche mit atmungsaktiven, hyperallergenem Bezug

MASS- UND MODELLEINLAGEN

EL115

Plextar langsohlig - Erdbeerdesign



Indikation:

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

Produkt:

Erdbeerdesign für Frauen, für schmalere Schuhe kann diese Einlage sehr zart gearbeitet werden, mit rutschfester Sohle

EL116

Plextar langsohlig - Citydesign



Indikation:

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie

Produkt:

Rutschfeste Einlage mit synthetischem Obermaterial

EL117

Plextar Classic, langsohlig



Indikation:

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Hohlfuß, Metatarsalgie


Produkt:

Sehr stabile Ausführung für Damen und Herren kann in schmal und breit gearbeitet werden

MASS- UND MODELLEINLAGEN

EL118

Plextar kurzsohlig - Erdbeerdesign

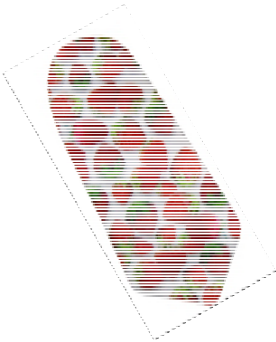

Indikation:


Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom I, Hohlfuß, Beschwerden im Metabereich

Produkt:

Einlage kann auf kurzsohlig gekürzt werden. Erdbeerdesign für Frauen, für schmalere Schuhe kann diese Einlage sehr zart gearbeitet werden, mit rutschfester Sohle

EL119

Plextar kurzsohlig - Citydesign

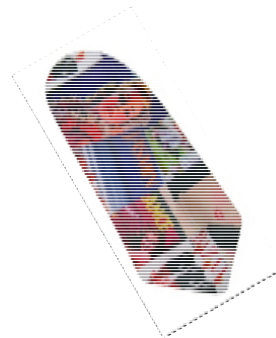

Indikation:

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom I, Hohlfuß, Beschwerden im Metabereich

Produkt:

Einlage kann auf kurzsohlig gekürzt werden. Rutschfeste Einlage mit modernem Obermaterial

EL120

Plextar kurzsohlig - Classic



Indikation:

Senk-, Spreiz-, Hohlfuß

Produkt:

Einlage kann auf kurzsohlig gekürzt werden. Rutschfeste Sohle

EL130

Rigiduseinlagen mit Zehenfeder



Indikation:

Senk-Spreizfuß, Köhler Syndrom I, Arthrose im Großzehengrundgelenk, Hohlfuß, Metatarsalgie, zur Ruhigstellung des Großzehengrundgelenks

MASS- UND MODELLEINLAGEN

EL131

High Heel-Einlagen



Indikation:

Senk-Spreizfuß, Fersenfrie für Damen Stöckelschuhe

Wirkungsweise:

Vermindert Bein- und Rückenermüdung, sowie Vorfußdruck und verbessert die Fersen-Stabilität.

Produkt:

Die Mittelfußknochen-Polsterung und die Pelotte sorgen für größtmöglichen Tragekomfort. Der Unterbau besteht aus rutschfestem Material und hilft dem Fuß, sich in seiner Position zu halten. Empfehlung: Einbau der Einlagen in den Schuh für optimalen Halt.

EL132

Fersensporneinlage / Bausatz



Indikation:

Fersensporn, Beinhautreizung im Fersenbereich, Überlastungsbeschwerden im Fersenbereich

EL135

ECO-Standard, langsohlig



Indikation:


Senk-Spreizfuß

Produkt:

Zarte Ausführung für Damen und Herren

EL121

Nummer 18, Sport-Golfeinlage

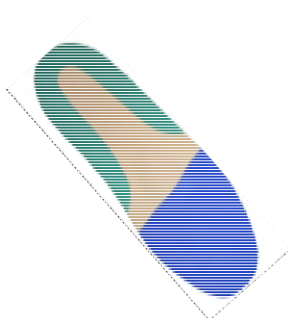

Indikation:

Knick-Senk-Spreizfuß, Knickfuß, Köhler Syndrom II, Arthrosen, Metatarsalgie

Produkt:

Der Bausatz ist vorne offen, um den Metapolster individuell einsetzen zu können. Die Einlage hat verschieden harte Oberflächen und ist randsohlenverstärkt. Dadurch hat sie eine extrem gute Standfertigkeit.

ZUBEHÖR & BETTUNGSEINLAGEN

Zubehör

- Diabetikerdeckung (EL 2010)
- Abrollhilfe
- Zehenfeder (EL 2003)
- Sohlenversteifung
- Anti-Allergenes Obermaterial in Rollen ca. 13 cm x ca. 50 m (EL 140)

Der Einbau von Einlagen oder Fußbetten als Schuhzurichtung ist möglich.

EL110

Bettungseinlagen für den fixen Schuheinbau

**Indikation:**

Diabetiker, Entzündungen im Fußbereich, Diabetischer Fuß

Produkt:

Der Bausatz ist unten nicht ausgeschliffen, die Einlage ist in den Schuh einzubauen. Der Seitenrand ist im Fersen- und Längsgewölbebereich erhöht und dadurch bettend.

EL122

Diabetikereinlagen, langsohlig

**Indikation:**

Entzündeter, trophischer und diabetischer Fuß

Produkt:

Weiche Softeinlagen – Weichbettung

Hinweis: Die Diabetikerpolsterung ist besonderen Ansprüchen ausgesetzt und hat eine reduzierte Haltbarkeit. Die Einlagen sollten halbjährlich erneuert werden.

BETTUNGSEINLAGEN & KINDEREINLAGEN

EL124

Weichschaumeinlagen FINN



Wurde durch die Einlage EL122 ersetzt.

Information

Die Krankenkassen haben leider entschieden, Sporteinlagen in Zukunft nicht mehr zu bezahlen. Für den Herbst haben wir vor, eine Innenschuhdruckmessung in unserer Einlagenabteilung einzuführen.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Verfügung.

EL127

Schaleneinlagen für Kinder kurzsohlig



Indikation:

Knickfuß, Senkfuß bei Kindern

Produkt:

Material aus Leder oder Kork

EL128

Schachteleinlagen für Kinder



Indikation:

Starker Knickfuß, Klumpfuß

Produkt:

Mit angenehmer Weichdeckungssohle, thermoelastische Ausführung

SPEZIALEINLAGEN

EL155

Sporteinlagen mit Feder-Stahl-Gerippe mit 3 Randzonen Verstärkung



Produkt:

Bausatz einer Sporteinlage mit einem Edelstahl-Gerippe innen, dieses ist ummantelt mit einem dämpfenden, viscoelastischen Spezialmaterial und einer atmungsaktiven, nicht rutschenden Oberfläche. Bei Sportlern ist eine Dämpfung der Auftrittsfläche unbedingt erforderlich, daher sind hochwertige viscoelastische Materialien verwendet. Das Abrollen wird durch das eingearbeitete Feder-Stahl-Gerippe wesentlich erleichtert. Zusätzlich wird durch eine Randzonen Verstärkung noch ein festerer Halt gegeben.

EL156

Sporteinlagen mit Feder-Stahl-Gerippe mit schwarz-türkiser Visco-Oberfläche



Produkt:

Bausatz einer Sporteinlage mit einem Edelstahl-Gerippe innen, dieses ist ummantelt mit einem dämpfenden, viscoelastischen Spezialmaterial und einer atmungsaktiven, nicht rutschenden Oberfläche. Bei Sportlern ist eine Dämpfung der Auftrittsfläche unbedingt erforderlich, daher sind hochwertige viscoelastische Materialien verwendet. Das Abrollen wird durch das eingearbeitete Feder-Stahl-Gerippe wesentlich erleichtert.

EL136

Power-Fußbett



Produkt:

Kraftfeld-Wirkung

Der Energie-Chip berücksichtigt diese Abnahme wie auch die Information von Kraftplätzen und baut eine Wirkung auf, die bei Sportlern die Leistungsbereitschaft erhöht und die Leistungsfähigkeit stärkt. Im Alltag unterstützt er die Statik und den Bewegungsablauf.

EL129

Sensomotorische Einlagen



Indikation:

Senk-, Spreizfüße

Produkt:

Sensomotorisches Einlagensystem das nach einer genauen Bewegungsanalyse auf die allgemeinen und speziellen Bedürfnisse des Kunden individuell angepasst ist. Die Versorgung, sowie das Schmerz- und Wohlbefinden der Füße sollte dokumentiert werden.

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

ELZ001

Silikon Pronations- / Supinationsleisten



Indikation:

Für den außen- oder innenüberlasteten Fuß

Wirkungsweise:

Verlagerung des Körpergewichts beim Auftritt jeweils von innen nach außen

Produkt:

Zum Einlegen in den Schuh, selbstklebend. Nicht rutschende Oberfläche fußseitig. Mit Gleitstoff auf einer Seite. Material aus hyperallergenen Silikon

Größen:	medium	large	x-large
---------	--------	-------	---------

ELZ002

Silikon Metaleisten



Indikation:

Beschwerden im Metatarsalbereich

Wirkungsweise:

Linderung der Beschwerden durch Entlastung

Produkt:

Zum Einkleben in den Schuh, selbstklebend. Nicht rutschende Oberfläche fußseitig. Vorwiegend zum Einbau für schmale Schuhe die für Einlagen nicht geeignet sind z.B. Theaterschuhe... Material aus hyperallergenen Silikon

Größen:	1	2
---------	---	---

ELZ003

Silikon Längsgewölbeleisten



Indikation:

Schmerzen im Bereich des Längsgewölbes oder statischen Beschwerden

Wirkungsweise:

Linderung der Beschwerden durch Entlastung

Produkt:

Zum Einkleben in den Schuh, selbstklebend. Nicht rutschende Oberfläche fußseitig. Vorwiegend für schmale Schuhe speziell auch für Stöckl-, Tanz- oder Theaterschuhen. Material aus hyperallergenen Silikon

Größen:	1	2	3
---------	---	---	---

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

ELZ018

Silikon Fersenkeil



Indikation:

Beinverkürzungsausgleich, zum Ausgleich von Beinlängendifferenzen bis ca. 4-6 mm, zur Stoßdämpfung, bei Fersenreizungen zur Körpergewichtsverlagerung und Entlastung der Ferse

Wirkungsweise:

Weichpolsterung im Bereich der Ferse

Produkt:

Oben mit Rutsch-Gleitbezug, blauer Oberflächenbezugsstoff. Material aus hyperallergenen Silikon.

Größen:	small	medium	large
---------	-------	--------	-------

ELZ004

Silikoneinlagen-Dämpfungseinlage mit Rutschbezugsstoff



Indikation:

Schmerzen im Fußsohlenbereich. Diese Dämpfungseinlage gehört in jeden **Sportschuh**, da der Fuß durch die Sehnen und Bänder von Natur aus auf Federung eingestellt ist.

Wirkungsweise:

Weichpolsterung (blau) im Bereich von Ballen und Ferse

Produkt:

Zum Einlegen in den Schuh. Nicht rutschende Oberfläche fußseitig. Material aus hyperallergenen Silikon

Größen:	small	medium	large	x-large	xx-large
---------	-------	--------	-------	---------	----------

ELZ005

Silikon Zehenspreizer



Indikation:

Für Defekte zwischen den Zehen, Zehenfehlstellung

Wirkungsweise:

Dehnung, Separierung, Schutz vor Wundreibung, Hautreizungen im Ballenbereich

Produkt:

Unter dem Strumpf zwischen den Zehen zu tragen. Material aus hyperallergenen Silikon.

Größen:	1	2	3
---------	---	---	---

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

ELZ006

Silikon Zehenrichter mit Zehenschlaufe



Indikation:

Für Defekte zwischen den Zehen, Krallenzehen

Wirkungsweise:

Schutz und Entlastung, Zehenschlaufe zieht die Krallenzehe nach unten und korrigiert

Produkt:

Unter dem Strumpf zwischen den Zehen zu tragen. Material aus hyperallergenen Silikon.

Größe (re/li):	universal
----------------	-----------

ELZ007

Silikon Zehenringe



Indikation:

Krallen- und Hammerzehen, Hühneraugen, Defekte an den Zehen

Wirkungsweise:

Schutz und Entlastung

Produkt:

Material aus hyperallergenen Silikon

Größen:	1	2	3
---------	---	---	---

OF6005...

Hallux-Valgus-Nachtschiene (1 Stk.)



Indikation:

Hallux Valgus

Wirkungsweise:

Lagerung nach operativer Korrektur

Produkt:

Fertigartikel mit Anpassung, individuelle Anfertigung
FB011 Zuschlag postoperative Anpassung

TNR. 34 050 001
 individuelle Anfertigung
 TNR. 34 050 002
 AZ 10 Min. postoperativ
 TNR. 34 050 013
 dynamics

Größen (re/li):	small	medium	large
-----------------	-------	--------	-------

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

FB100

Hallux Schiene mit Doppelgelenk



Indikation:

Hallux-Valgus, bei leichten und mittelgradigen Ballenzehen, in der Prophylaxe und während der postoperativen Rehabilitation

Wirkungsweise:

Zwei Drehachsen ahmen die natürliche Bewegung des Zehengrundgelenks nach, sodass man das Produkt während des Gehens verwenden kann. Die Geleinlagen können gekühlt werden (lokale Kryotherapie).

Produkt:

Schiene zur aktiven Korrektur einer Hallux-Valgus Erkrankung, individuelle Anpassung

Größe (re/li):

universal

FB035

Hallux Strumpfbandage



Indikation:

Zehenfehlstellung im Großzehenbereich

Wirkungsweise:

Lagerung und Korrektur der Großzehe

Produkt:

Fertigartikel mit Anpassung

keine Kassenleistung

Größe (re oder li):

x-small

small

medium

large

x-large

b ELZ008

Silikon Ballenschild mit Hammerzehenring



Indikation:

Metatarsalgie, Krallen- und Hammerzehen

Wirkungsweise:

Druckentlastung des Metatarsalbereichs, Unterstützung des Spreizfußgewölbes, Schutz bei Krallen- und Hammerzehen

Produkt:

Unter dem Strumpf auf der Haut zu tragen, zum Einhängen an einer Zehe (wenn dies eine Hammerzehe ist kann diese gleichzeitig korrigiert werden), Material aus hypoallergenen Silikon

Größe (re/li):

universal

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

ELZ017

Silikon Ballenschild mit Zwischenzehenseparator



Indikation:
Metatarsalgie

Wirkungsweise:
Druckentlastung des Metatarsalbereichs, Unterstützung des Spreizfußgewölbes

Produkt:
Unter dem Strumpf auf der Haut zu tragen, zum Einhängen zwischen zwei Zehen, Material aus hyperallergenen Silikon

Größe (re/li):	universal
----------------	-----------

ELZ009

Silikon Ballenschutz



Indikation:
Entzündung des Hallux Valgus

Wirkungsweise:
Druckschutz, Entlastung und Korrektur

Produkt:
Unter dem Strumpf auf der Haut zu tragen, an der Zehe zum Einhängen, Material aus hyperallergenen Silikon

Größe:	universal
--------	-----------

ELZ015

Silikon Zehenkeile / -separatoren



Indikation:
Defekte zwischen den Zehen, Zehenfehlstellung

Wirkungsweise:
Dehnung, Separierung, Schutz vor Wundreibung, Hautreizungen und Hühneraugen

Produkt:
Unter dem Strumpf auf der Haut zu tragen, Material aus hyperallergenen Silikon

Größen:	small	large
---------	-------	-------

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

FO100

Rathgeber Vorfuß-Entlastungs-Schuh (1 Stk.)



Indikation:
Diabetischer Fuß, Gangrän, Decubitus,
Ulcus, Nekrosen, postoperativ

Wirkungsweise:
Entlastung des Vorfußes



Schutzkappe mit Velcroüberzug
zum Schutz der Zehen liegt bei

TNR. 34 161 024

Produkt:
Fertigartikel, Anpassung ohne Schutzbügel, rutschfeste Schuhsohle

Größen:	small (36-38)	medium (39-41)	large (42-44)	x-large (45-47)
---------	---------------	----------------	---------------	-----------------

ELZ016

Silikon Zehenkappen



Indikation:
Defekte an der Zehen-/Fingerkuppe oder im Nagelbereich

Wirkungsweise:
Druckentlastung und Schutz

Produkt:
Unter dem Strumpf auf der Haut zu tragen, Material aus hyperallergenen Silikon

Größen:	1	2
---------	---	---

MSFO130

Fersenkissen aus Silikon



Indikation:
Hohllegung bei Fersensporen, Beinhautreizungen oder Beinhautentzündungen
plantar im Fersenbereich zur Stoßdämpfung

Wirkungsweise:
Hohllegung und Weichpolsterung im Bereich der Ferse, Dämpfungsfersenkissen mit
zentraler Hohllegung (blau)

Produkt:
Material aus hyperallergenen Silikon. Hinweis: unsere Ausführung ist dicker als
üblich. Dadurch erfolgt eine stärkere Hohllegung.

Größen:	small	medium	large
---------	-------	--------	-------

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

ELZ014

Weichbettung einer Einlage



Indikation:

Hohllegungen von Druckstellen und Exostosen, trophischen Störungen und Diabetes oder Gicht

Wirkungsweise:


Durch Dämpfungsmaterialien erfolgt die Weichbettung auf Einlagen

Produkt:

Individuelle Anfertigung, Reparatur

MSAEAD

Anti-Embolie-Strümpfe bis zum Knie

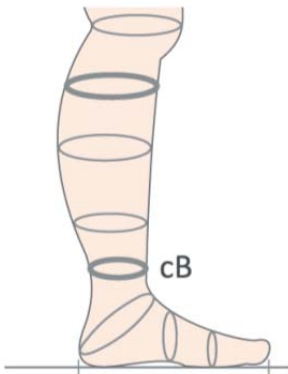


Indikation:

Kompressionsklasse I für liegende Patienten

Größen:	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
---------	----	---	---	---	----	-----	------

MSAEAG

Anti-Embolie-Strümpfe bis über das Knie

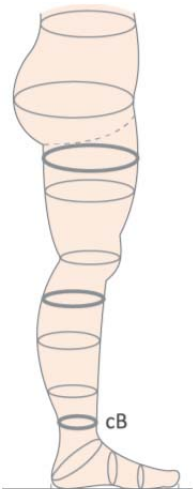

Indikation:

Kompressionsklasse I für liegende Patienten

Größen:	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
---------	----	---	---	---	----	-----	------

FUSS- / ZEHENKORREKTUR

ELZ010

Metapolster, nierenform



Produkt:

Bausatz Metapolster zur Fixierung auf Einlagen oder zum Einbauen in den Schuh.

Größen:	1	2
---------	---	---

ELZ011

Metapolster, tropfenform



Produkt:

Zum Einbauen in den Schuh unter der Lederdecke.

Größen:	1	2	3
---------	---	---	---

ELZ012, ELZ013

Quermeter, klein oder groß



Produkt:

Bausatz Quermeter zur Fixierung auf Einlagen oder zum Einbauen in den Schuh.

Größe:	universal
--------	-----------

SOCKEN

7RD0000..

Diabetikersocken, Lambert



Socken ohne einschneidende Ränder, anschmiegsam wie eine zweite Haut - ideal für Diabetiker oder Patienten mit Durchblutungsstörungen, geschwollenen Beinen, uvm.

- Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyamid
- Lindert lästige Fußbeschwerden
- Wohligen Wärmegefühl
- Mit feiner Fußsohle
- Für Allergiker geeignet
- Modische Optik
- Farben: schwarz, anthrazit, weiß, (beige)

Größen:	37/39	40/42	43/45	46/47
---------	-------	-------	-------	-------

OD3706-gr-.....

Wohlfühlsocken



- Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan
- mit stützender und venenfreundlicher Wirkung
- besonders hautfreundlich und für Diabetiker geeignet
- ohne drückende Naht an der Spitze
- mit besonders weichem und breitem Piquetbund
- erzeugt ein wohligen Wärmegefühl an den Füßen
- Farben: schwarz, grau, weiß

Größen:	37/39	40/42	43/45	46/47
---------	-------	-------	-------	-------

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel	Gr.	Tarif netto	Mwst	Gesamtpreis
Maßeinlagen					-	-
EL 111	14.121.000	Aktiveinlagen,blau ,langsohlig	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 112	14.121.000	langsohlige Korkeinlage	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 113	14.121.000	Softeinlagen marmoriertes Sohle	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 114	14.121.000	Softeinlagen m.gelochter Oberfläche	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 115	14.121.000	detto,abwaschb Erdbeerdesign,lang	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 116	14.121.000	detto,abwaschb Journaldesign,lang	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 117	14.121.000	Plextar Classic, langsohlig	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 118	14.121.000	Plextar Classic, kurzsohlig,Erdbeer	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 119	14.121.000	Plextar Classic, kurzsohlig,Journal	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 120	14.121.000	Plextar Classic, kurzsohlig	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
Modelleinlagen, langsohlig,					-	-
EL 141.1	14.141.000	Modelleinlagen,langsohlig	indiv.Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 141.2	14.141.000	Modelleinlagen,langsohlig	indiv.Anfertigung	68,80	13,76	82,56
Bettungseinlagen, nach Modell-oder ausgegossenen Schaumabdruck					-	-
Bettungseinlage, langsohlig bei Indik. wie Diabetes, Neuropatien, Polyarthritits,PCP Fuß, Chacotfuß. Gicht, trop					-	-
EL 122	14.151.000	Bettungseinlagen , Diabetiker Einlagen	indiv Anfertigung	134,72	26,94	161,66
EL 110	2 x 14.155.009	Modelleinlagen zum Fixeinbau durch OT-Schuhmacher		147,46	29,49	176,95
	14.151.002	Bettungseinlage mit Abzug bei Facharztmodell			-	-
Oberfläche ist nach einem halben Jahr auszutauschen				Reparaturschein schreiben !!!		bei SB
EL 2010	14.120.000	neue trophische Oberfläche bei Bettungseinlagen		32,88	6,58	39,46
High Heel Einlagen für Stöckelschuhe					-	-
EL 131	14.121.000	Stöckelschuheinlagen n Maß	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
Fersensporneinlagen					-	-
EL 132	14.121.000	Fersensporneinlagen	Krankenkassenverr.	68,80	13,76	82,56
Privatverrechnung						
EL 132	14.121.001	Fersensporneinlagen	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
	2x14111 000	Einbau von isolierten Hohllegungen	2xTNR 14111 000	45,86	9,17	55,03
		Summe		114,66		137,59

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel	Gr.	Tarif netto	Mwst	Gesamtpreis
EL 130	14.141.000	Rigiduseinlage mit Zehenfeder	indiv. Anfertigung	68,80	13,76	82,56
EL 135	14.121.000	ECO-Standard, langsohlig		68,80	13,76	82,56
EL 124	14.151.000	Weichschaumeinlage FINN		134,72	26,94	161,66
EL 127	14.121.000	Schaleneinlage f. Kinder, kurzsohlig		68,80	13,76	82,56
EL 128	14.121.000	Schachteleinlage f. Kinder		68,80	13,76	82,56
Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel	Gr.	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
EL 155	-	Sporteinlage, 3 Randzonen		188,00	37,60	225,60
EL 156	-	Sporteinlage, Visco Oberfläche		188,00	37,60	225,60
EL 136	-	Power Fußbett		156,67	31,33	188,00
EL 129	-	Sensomotorische Einlage		133,33	26,67	160,00

Hilfen bei Schuhen - die für Einlagen zu schmal oder eng sind

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel	Gr.	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
ELZ 001		Einlegbare Silikon Pronations od. Supinationsleisten p P		32,08	6,42	38,50
			Grössen m,l,x.l,			
ELZ 002		Einklebbare Silikonmetapolster	gr. 1,2,	23,75	4,75	28,50
ELZ 003		Einklebbare Silikon- Längsgewölbekeile	gr. 1,2,3,	27,08	5,42	32,50
ELZ 018		Einklebbare Silikon- Fersen-keile	Small,med,large	19,88	3,98	23,86
ELZ 004		Silikon Dämpfungseinlegesohlen	s,m,l,xl,xxl,	23,75	4,75	28,50
ELZ 005		Silikon Zehenspreizer	Gr.1,2,3,	8,25	1,65	9,90
ELZ 006		Silikon,Zehenrichter m Zehenschlaufe	Gr. Universal	10,75	2,15	12,90
ELZ 007		Silikon Zehenring	Gr. 1,2,3,	8,25	1,65	9,90
ELZ 008		Silikon Ballenschild m Ring	Gr. 1,2,3,	18,17	3,63	21,80
ELZ 017		Silikon Ballenschild m Zwischenzehensep	Gr. 1,2,3,	18,17	3,63	21,80
ELZ 009		Silikon Ballenschutz	Gr. Universal	12,33	2,47	14,80
ELZ 015		Silikon Zehenkeile	gr. Small-large	10,67	2,13	12,80
ELZ 016		Silikon Zehenkappen	Gr. 1, 2,	11,50	2,30	13,80
MSFO 130		Silikon Fersensporkissen	Small,med,large	19,88	3,98	23,86
ELZ 014	14.120.000	Weichbettung einer Einlage, p. Paar, nachträglich od. bei Reparatur		32,88	6,58	39,46

Sonderwünsche bei Einlagen

Artikel Nr.	VPE	Artikel	Gr.	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
EL 2000	Stück	Mehrpreis Quermeta auf Einlage		18,55	3,71	22,26
EL 2001	Stück	Mehrpreis Fersenhohllegen auf Einlage		12,45	2,49	14,94
EL 2002	Stück	Mehrpreis Ballenfreilegung auf Einlage		12,85	2,57	15,42
EL 2004	Stück	Mehrpreis Supinationskeile auf Einlage		12,58	2,52	15,10
EL 2008	Stück	Mehrpreis Pronationskeile auf Einlage		12,58	2,52	15,10
EL 2009	Stück	Mehrpreis Höhenausgleich auf Einlage		22,12	4,42	26,54
EL 2010	Paar	zusätzlicher Diabetikerbezug		32,17	6,43	38,60
EL 2024	Paar	zusätzlicher Oberflächenbezug		32,17	6,43	38,60
EL 2025	Paar	zusätzliche Lederoberfläche,micro gelocht		32,17	6,43	38,60
EL 2026	Paar	zusätzliche Lederoberfläche,unperforiert		32,17	6,43	38,60
EL 2027	Stück	isolierte Silikonfreilagerungen		12,64	2,53	15,17

Hallux Valgus

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
	34050 001	Hallux Korrektur Orthese, Silikon, ind. Anfertigung	83,43	16,69	100,12
	34050 002	postop. Erstversorgung Pauschale	9,96	1,99	11,95
OF6005...	34050 013	Nachtschiene dzt. Ofa dynamics Halluxschienen	23,97	4,79	28,76
FB100	-	Hallux Schiene mit Doppelgelenk	41,58	8,32	49,90
FB035	-	Hallux Strumpfbandage			

wird der Hallux operiert

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
FO 100	34 161 024	Ofa Vorfußentlastungsschuh	60,19	12,04	72,23

Hallux Rigidus

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
EL130	14 121 000	Einlagen nach Maß	68,80	13,76	82,56

	2 x 14 110 000	Zehenfeder / Rigidusfeder	32,64	6,53	39,17
--	----------------	---------------------------	-------	------	-------

		Summe	101,44	20,29	121,73
--	--	-------	--------	-------	--------

Lambert Diabetikersocken

Artikel Nr.	Farbe	Artikel, Größen:	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
7RD0000	schwarz	Lambert Diabetikersocken , 37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.	9,08	1,82	10,90

7RD0000	anthrazit	Lambert Diabetikersocken , 37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.	9,08	1,82	10,90
---------	-----------	--	------	------	-------

7RD0000	weiß	Lambert Diabetikersocken , 37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.	9,08	1,82	10,90
---------	------	--	------	------	-------

7RD0000	beige	Lambert Diabetikersocken , 37/39, 40/42, 43/45, 46/47, 1P.	9,08	1,82	10,90
---------	-------	--	------	------	-------

Anti Embolie-Strümpfe

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel, Größen:	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
MSAEAD	47 370 11	Anti Embolie-Str. A-D bis zum Knie 1 Paar	13,98	2,80	16,78

MSAEAD	47 370 11	Anti Embolie-Str. A-D bis zum Knie 50 Paar	7,50	1,50	9,00
--------	-----------	--	------	------	------

MSAEAD	47 370 11	Anti Embolie-Str. A-D bis zum Knie 100 Paar	5,50	1,10	6,60
--------	-----------	---	------	------	------

Größensortiert: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL; A-D ohne Haftband

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel, Größen:	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
MSAEAG	47 370 16	Anti Embolie-Str. A-G, Oberschenkel 1 Paar	24,63	4,93	29,56

MSAEAG	47 370 16	Anti Embolie-Str. A-G, Oberschenkel 50 Paar	9,50	1,90	11,40
--------	-----------	---	------	------	-------

MSAEAG	47 370 16	Anti Embolie-Str. A-G, Oberschenkel 100 Paar	7,50	1,50	9,00
--------	-----------	--	------	------	------

Größensortiert: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL; A-G mit Haftband

Socken

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel, Größen:	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
		Waden Reisestrumpf	9,90	1,98	11,88

		Waden Herrenvenenstrümpfe	12,50	2,50	15,00
--	--	---------------------------	-------	------	-------

Größensortiert: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Artikel Nr.	TNR.Nr.	Artikel, Größen:	VKP netto	Mwst	Gesamtpreis
7RM000114		Dalet Balsam, 30 g Salbe	11,50	2,30	13,80